

OAO Bock®

QUALITY FOR LIFE



胸椎装具

Dorso Arexa

ドルソアレクサ

28R140

Product Information


28R140 Dorso Arexa

『ドルソ アレクサ』は、3点支持の原理に
装着者の操作性や使用状況を考慮した

■ 3点支持固定

胸骨パッド・恥骨パッド・背部パッドの3点による固定で脊椎を伸展位に保持し、安定位を保ちます。

胸骨パッドは、パイプの曲げ加工によってパッドの角度を調整することができます。また各パッドは、身体にフィットしやすいプラスチック素材と構造を採用しています。より装着者の体型に応じた適切な支持固定が行えます。

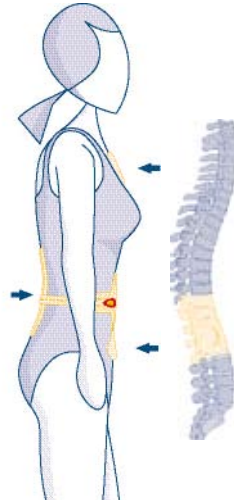

■ フリーサイズ調整

本製品はフリーサイズで、ウエスト周径60～150cmの装着者の方に対応します。高さ方向は37～60cmの範囲で調整が可能です。ウエスト周径の調整は、ウエストベルトを必要な長さにカットして行ないます。カットしやすいように目盛りが刻印されていますので、カットする長さに合わせた調整を簡易に行なうことができます。

高さ方向は、付属の専用レンチにより胸骨パッドと恥骨パッドの2本のパイプを上下方向にスライドさせる調整が可能です。特に、胸骨パッドは2種類(ロング・ショート)の長さを用意しています。また、背部パッドもウエストベルトへの取り付け高さを3ヶ所から選ぶことができます。



に基づき、脊椎を伸展位に保持します。

、装具のデザイン設計を行なっています。

■ ラチェットによる簡易着脱

装具の着脱にはウエスト部分にラチェットロック機構を採用しています。ラチェットロックはレバーによる微調整が可能ですので、ロック後も装具をしっかりと固定することができます。ロックの解除はボタンを押すだけで、スムーズに取り外すことができます。例えば、ベッドサイドなどでも簡易に着脱できますので、装着者だけでなく、介助者の方にも簡易な操作が行なえます。



■ 防水素材の採用

製品には発泡フォームやプラスチックをはじめとする防水性のある素材で構成されていますので、シャワー浴や水治療法との併用が可能です。水に濡れた後は、タオルなどで拭き取るだけで、お手入れも簡単です。また、汚れなども拭き取りやすいので、装具を清潔に保つことができます。



胸椎装具 ドルソ アレクサ【28R140】



製品規格


下記のサイズ表からお選び下さい。

製品 No.	種類	種類
		ウエスト周径(cm)
28R140	フリー	60.0 ~ 150.0

※製品高さ調整範囲 37.0~60.0cm

《サイズの測り方》

イラストのようにウエスト周径を測ります。

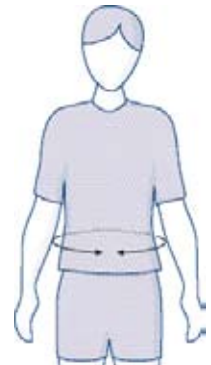

お問い合わせ先

製品の取扱いにつきましては、義肢装具製作所までお問い合わせください。

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp

〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F

TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 本カタログの内容は2009年9月現在のものです。