

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



肩関節外転装具 / 肩関節外転・外旋装具

Omo Immobil

オモ インモビル

50A10 外転用 / 50A11 外転・外旋用

Product Information

50A10 Omo Immobil

50A11 Omo Immobil Rotation

『オモ インモビル』は、受傷後や手術後などの肩
付属の調整パーツを用いることで、個々の装着者



■ 5段階の外転角度設定

0° / 15° / 30° / 60° / 90°

3種類のパーツの選択により、5段階の外転角度で保持ができます。

- ・0° : 面ファスナーパーツ
- ・15° : 外転ブロック(小)
- ・30°/60°/90° : 外転ブロック(大)

面ファスナーでパーツを着脱できますので、簡易に的確な保持が可能です。



■ 3段階の外旋角度設定【50A11】

10° / 20° / 30°

肩関節の外旋位を保持するために10°、20°、30°の3つの角度から前腕部のパイプフレームを選択いただけます。本体カバーを外して、初期設定0°の前腕パイプフレームとそれぞれの角度の前腕パイプフレームを交換することで、外旋角度の設定ができます。

前腕パイプフレームは連結部分のロックピンを外すことで簡易に交換が可能です。外旋角度設定用の前腕パイプフレームは別売のサービスパーツとしてもご用意しています。**【50A10】** オモ インモビルにも使用することができます。



肩関節外転装具 肩関節外転・外旋装具

関節を保持するために設計されています。
に合わせた最適なポジションを実現します。

■ 快適な本体カバー

本体カバーは装着感を考慮した通気性の良いフォーム素材を採用しています。
また、本体カバーを衛生的に保つために、カバーをパイプフレームから取り外して手洗いが可能です。交換用本体カバーもサービスパーツとしてご用意しています。



■ 着脱式の手掌パッド

手掌パッドは、面ファスナーで容易に位置調整が可能となっています。装着者の手の位置に合わせて取り付けることで手掌部を良肢位に保ちます。



■ 容易な調整と着脱

装着者の体型に合わせて、肩やウエストのベルトの位置や長さを調整することができます。すべてのベルト類は面ファスナーのフックパーツにて容易に着脱が可能です。



**肩関節外転装具
オモ インモビル【50A10】**



**肩関節外転・外旋装具
オモ インモビル ローテーション【50A11】**




製品規格

下記のサイズ表からお選び下さい。


製品 No.	種類	規格
		身長(cm)
50A10=S	S	150.0 – 165.0
50A10=M	M	165.0 – 175.0
50A10=L	L	175.0以上

※左右兼用

製品 No.	種類		規格
			身長(cm)
50A11=R-S	右	S	150.0 – 165.0
50A11=R-M		M	165.0 – 175.0
50A11=R-L		L	175.0以上
50A11=L-S	左	S	150.0 – 165.0
50A11=L-M		M	165.0 – 175.0
50A11=L-L		L	175.0以上

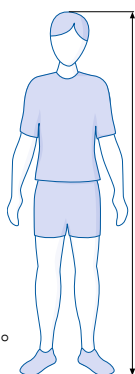

《サイズの測り方》
装着者の身長から選択します。

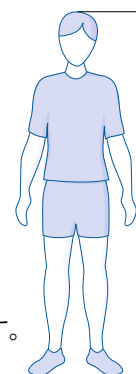

《サイズの測り方》
装着者の身長から選択します。

お問い合わせ先

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp

〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F

TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カatalogの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 本カタログの内容は2009年5月現在のものです。