

エラスティック アンクルサポート 【504】

『エラスティック アンクルサポート』は、足関節の保護・固定を目的としています。ソフトで伸縮性のあるベルトにより、簡易に足関節のフィギュアエイト機能が得られる足関節バンドです。




製品 No.	種類	規格
		足部8字周径(cm)
504=S	S	51.0~53.0
504=M	M	53.0~55.0
504=L	L	55.0~57.0
504=XL*	XL	57.0~59.0
504=XXL*	XXL	59.0~61.0

※XL、XXLサイズは受発注対応品となります。

※左右兼用

《サイズの測り方》

イラストのように、足部を8の字に周回させた周径を測ります。

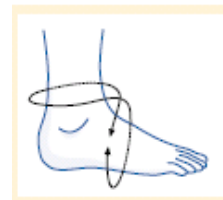

《特徴》

- 簡易に足関節のフィギュアエイト機能が得られます。
- 幅80mmのベルトはソフトで伸縮性に優れています。
- 両端のループによりバンドと足関節をしっかり固定します。

装着手順

①バンド端の一方のループを足の甲に通します。

②ベルトを健常側から足首に巻き付けます。



③ベルトを巻き付けた後、反対側のループを足の甲に通します。

④ループを通したら装着完了です。

