

ワンタッチバルブ (21Y14)

ワンタッチで装着可能な大腿ソケット用バルブ

「ねじ込まない」バルブという新しいコンセプトを採用

- 両側のレバーを引き上げるだけで簡単着脱
- 密閉時には「カチッ」と音でお知らせ安心ロック
- 2重のゴムで空気を確実に密閉
- 大腿吸着ソケットに最適 引き布を誘導するのに十分な開口部
- 大きなレバーは、手先の細かい動作が難しい方、ネジ式より簡単に装着したい方に



<取り付け方法>



納品時にプラスチック製のダミーとネジが同封されています。
陽性モデル上に、バルブベースよりもやや広い水平面を作り、バルブ内側全面がモデルに接触することを確認します。ダミーを開口部に挿入し、適切なネジを使用して両部品を陽性モデルに固定します。
テルモリンにより真空成形する際、バルブベースとソケットを確実に密着させるために、接触面にシリコーン接着剤 617H46、または同等品を薄く塗布します。
ラミネーションの場合はダミーをネジ留めし、通常通り注型を行って下さい。