

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Here it Comes !

お待たせ  
しました！

2009年 完成用部品認可

**1C30 トライアス**

2009年 完成用部品価格 ¥116,200

For Otto Bock Customer

# 1C30 トライアス

『今までの義足では体験したことのない感覚』

柔らかく・路面をつかむ・衝撃のない歩行を…MG2-3ユーザーに



## 歩行の補助

カーボンの反発力で歩行中の前方移動を助ける働きがあります。長時間歩行しても疲れにくい設計です。



## 製作工程の簡略化

ワンタッチで取り外し可能なコネクションプレートが付属。フォームカバーの脱着が容易です。



## 高い衝撃吸収能力

薄めのカーボンプレートを重ねることで、優れたクッション性を生み出し、断端への衝撃を抑えます。



## フットシェルの強度アップ

**New**



2C3(1C30専用フットシェル)のつま先部分をケブラー素材で補強。早期の破損を防止します。

## 人体足部の構造を再現した動き

足関節に似た可動性を再現することで、屋外の凸凹や斜面に対応。屋外でも安定した歩行を提供します。



## 左右均衡の取れた歩行

つま先部分は3枚のカーボンプレートで、大きな負荷に対応。義足でしっかり踏み切ることが出来ます。

## カテゴリー選択の手順 (ユーザーのサイズと体重が交わる箇所の数字を選択して下さい)

- ①サイズと体重から適したカテゴリーを選択
- ②MG3の方や、上限体重がぎりぎりの場合は、1つ上のカテゴリーを選択
- ③選択したカテゴリーのレンタル品を試着して最終選択

\* 規定体重を超えて使用された場合は、保証対象外となります。

体重(kg)	サイズ(cm)										
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
- 60kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
61 - 80kg	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
81 - 95kg	-	-	3	3	2	2	2	2	1	1	
96 - 110kg	-	-	-	-	3	3	3	3	2	2	
111 - 125kg	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3	

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

オットーボック・ジャパン株式会社 [www.ottobock.co.jp](http://www.ottobock.co.jp)

〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F

TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

お問い合わせ先