

ottobock.

完成用部品

# 1C68 トリトン サイドフレックス

回内外±10度の可動域を実現



Quality for life



街中の平らな道路にもちょっとした傾斜があります。  
1C68は、M-Lユニットの動きによって、足底が全面接地し、安定した歩行を可能にします。

歩行時だけでなく、様々な姿勢での立位や、電車やバスなど不安定な場所でも、M-Lユニットが動く事で安定した立位が保てます。

不意にソケットや膝継手が傾くことで起こる転倒リスクや全身の代償の動き、ソケット内の不快感の大幅な軽減が期待できます。



こちらをご覧ください！  
機能の解説動画

## 1C68の構造



回内外  
±10度

M-Lユニット


耐水仕様のチタンヘッド

ヒールウェッジ


足部本体の構造は  
1C63トリトンLPと同様

指股付き

## M-Lユニットの内部構造

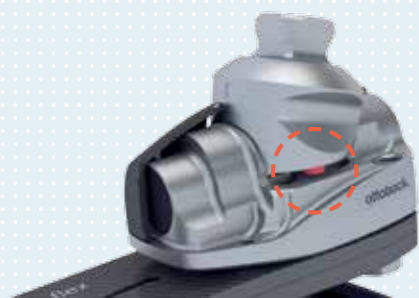

左右のバンパーが可動時の動きを滑らかに

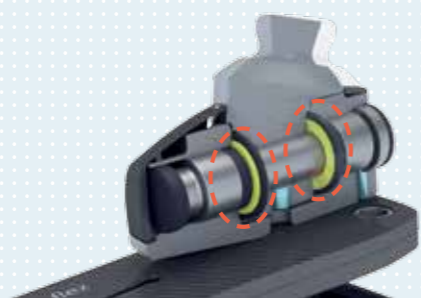

厳重な密閉により、内部パーツを保護




内蔵の軸が回転することにより、10度の動きを可能とする

## ユーザーの声：回内外±10度可動がもたらす効果



足部でこんなに大きな違いがあるとは思わなかったわ！

足部が動くことで、ソケット内の快適性も上がりました！

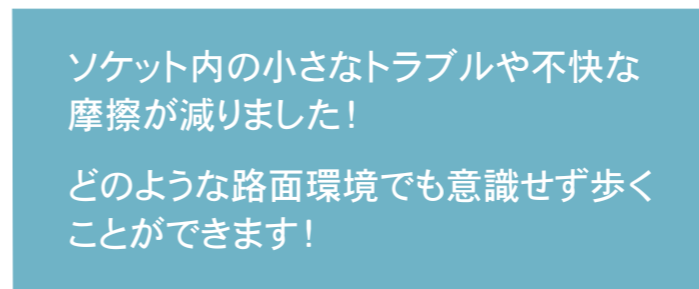


ソケット内の小さなトラブルや不快な摩擦が減りました！

どのような路面環境でも意識せず歩くことができます！



こちらをご覧ください！  
ユーザー動画


## 快適性と安定性の向上

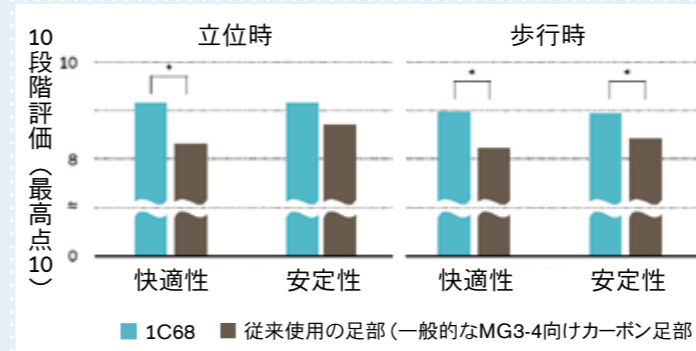

左グラフは、1C68と従来使用足部を比較した場合の快適性と安定性を10段階で評価した結果を示す。

回内外10度の可動により、ユーザーは立位および歩行時の両方において、快適性と安定性の向上を認識することができる。

\*立位の快適性と歩行時に、特に顕著な変化が認識されている

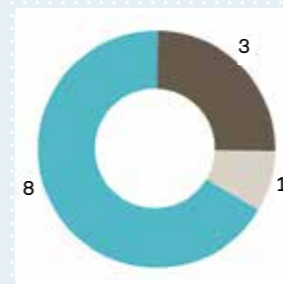

左グラフは、パイロットスタディ後、12名の対象者による、1C68と従来使用足部を比較した好みの結果である。

■ 1C68の方が好み  
■ 従来使用の足部の方が好み  
■ 違いはない

12名の片側下腿義足使用者を対象としたパイロットスタディより

# テクニカル インフォメーション

## 発注品番 (注文時の表記例)

製品番号 = 左右 サイズ - カテゴリー - P / 色 形状  
 1C68 = R 24 - 3 - P / 4 N

### 同梱内容

- ・スペクトラソック
- ・ヒールウェッジ2種
- ・フットシェル



製品番号	1C68									
モビリティグレード	3 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長 (幅狭フットシェルの場合)	75 mm		76 mm	81 mm		86 mm	-	-	-	
実長 (標準フットシェルの場合)	-	-	82 mm	84 mm	86 mm	90 mm		93 mm	96 mm	
重さ (幅狭フットシェルの場合)	620 g	690 g	720 g	770 g	785 g	835 g	-	-	-	
重さ (標準フットシェルの場合)	-	-	730 g	780 g	805 g	845 g	870 g	990 g	1025 g	
最大体重制限	100 kg					125 kg				

## カテゴリー表 (カテゴリーによって体重制限は異なります)

体重 \ サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
55 kg まで	1	1	1	1	1	-	-	-	-
56 - 75 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
76 - 100 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101 - 125 kg	-	-	-	4	4	4	4	4	4

■ 幅狭フットシェルのみ ■ 幅狭、標準共に選択可能 ■ 標準フットシェルのみ

## 交換部品

### 2C6 フットシェル

#### コネクションプレート付

標準と幅狭の2種類から選択してください。

差高 標準 (N) 10 mm 幅狭 (S) 15 mm

#### 発注品番 (注文時の表記例)

製品番号 = 左右 サイズ / 色 形状  
 2C6 = L 25 / 4 S

製品番号	2C6									
左右	左 (L), 右 (R)									
サイズ (幅狭)	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	-	-	-	
サイズ (標準)	-	-	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
色	ベージュ (4)									
形状	標準 (N), 幅狭 (S)									

・ 2C19 コネクションプレート標準用

・ 2C20 コネクションプレート幅狭用

\* 2C19、2C20の発注品番は義足総合カタログをご覧ください。

### 2F60 ヒールウェッジ (2種セット)

発注品番	2F60=21-22	2F60=23-24	2F60=25-26	2F60=27-28	2F60=29-30
対応サイズ (cm)	22	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F  
 www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112

お問合せ先