


New

## テクニカルデータ



	3R80	3R80=ST
発注品番	3R80	3R80=ST
近位接続	ピラミッド	スクリュートップ
遠位接続	34 mm チューブクランプ	34 mm チューブクランプ
MOBIS®	3 - 4	3 - 4
体重制限	150 kg	150 kg
最大屈曲角度	150°	150°
重さ	1240 g	1255 g
システムハイ	163 mm	179 mm
実寸 (遠位端から近位接続位置まで)	220 mm	220 mm
材質	アルミ 他	アルミ 他
価格	従来の3R80+と同価格	従来の3R80+と同価格
その他	・調整ツール 710H10 =2×3 付属 ・チタン製 34mm防水チューブアダプター (排水機構付) 2R57=16-285-WF付属	

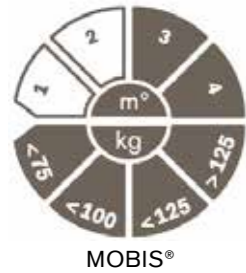

## 推奨する足部組合わせ

- ・ 1C60 トリトンフット
- ・ 1C63 トリトンLP
- ・ 1C61 トリトンVS
- ・ 1C64 トリトンHD
- ・ 1C40 C ウォーク
- ・ 1E56 アクション
- ・ 1C30 トライアス
- ・ 1D35 ダイナミックモーション



© Otto Bock Japan K.K. · P-20131001-PIT · Product Information

## 3R80+

山へ、海へ、自由に

防水、ロック付、スクリュートップ追加



Quality for life

お問合せ先

# 使用環境を選ばない 防水+ロック機構が付属 ユーザーの生活にフィットするイールディング膝 NEW 3R80+

- 従来のロータリー油圧機構はそのままに、新機能をプラス
- 3m防水、ロック機能付
- 塩水、塩素水、石けん水、汗、尿まで対応
- スクリュートップタイプが仲間入り

## 3R80+とは

中～高活動ユーザー向けのロータリー油圧式イールディング膝継手イールディング機構により、階段や斜面での交互歩行ができるなど、アクティブなユーザーに人気がある。

- ユーザーの動きを妨げないスムーズなイールディング
- 遊脚相の追随性に優れ、ゆっくりから小走りまで対応
- 体重制限150kgで、耐久性も高い

## NEW: スクリュートップタイプ



従来はピラミッドだけだった上部接続に、新たにスクリュートップが仲間入り。

接続スペースが限られる長断端や膝離断のケースでも、3R80+を使用できる可能性が広がりました。価格はもちろん同じです。

- 3R80 ピラミッドタイプ
- 3R80=ST スクリュートップタイプ



## NEW: ロック機構付

膝継手上部のレバー操作により、膝継手をロックすることが可能。義足を装着し、膝を完全伸展させた状態でレバーを下げるだけ。ユーザー自身が操作できます。プールサイドや水深の浅い所を歩く場合、長時間立ち続けなければいけない場合、悪路を歩く場合など、絶対に膝が曲がって欲しくない状況に便利です。



### ▶ ロックON

荷重しながら膝を完全伸展させ、レバーを下げる。▶ 膝継手は固定されて曲がらない。



### ▶ ロックOFF

荷重をした状態で膝を完全伸展させ、レバーを上げる。▶ 出荷時の状態

## NEW: 防水

義足だからという理由で、生活の範囲を制限したくない防水機能付の3R80+なら、水場の使用環境でも不安なく生活ができ、様々なアクティビティを満喫することもできます。海・川・プール・お風呂...可能性が広がります。

### ◆ 3R80+の防水機能

- 塩水、塩素水、石けん水、汗、尿への耐性
- 潜水可能な深さ: 3m
- 防水のチューブアダプターが付属

- \* 水に濡れる場所で使用した際は、表面を綺麗に拭き、水分が残らないように空気乾燥させてください。
- \* 濡れた場所で使用する際には、足が滑ったり、膝継手の動きに変化が生じて転倒する危険があります。必ず、事前にロックをかけてください。
- \* 砂や埃が浸入する環境での使用は、破損や故障に繋がりますのでご注意ください。

### ◆ 防水義足として組上げる場合の選択肢

ソケットテクノロジー		
6Y85	TFアダプトライナー	
6A30=20	シャトルロック プラスチック	ピン
21Y14	プッシュバルブ	
21Y21	グリップバルブ	吸着
21B37	サスペンションスリーブ 大腿用	ベルト

アダプター	
4WR95=1	ラミネーションアンカー ピラミッドレシーバー
4WR95=2	ラミネーションアンカー ピラミッド
4R72=*	ダブルアダプター

足部	
1C63	トリトンLP
1C64	トリトンHD (1C60トリトンの防水タイプ 同価格)

- \* その他、アクアラインシリーズ全般との組み合わせが可能です。
- \* チタン製のアダプターであっても、防水仕様の製品とは限りません。また、必ずチタン製のネジを使用してください。
- 4R72は、近日チタンネジに仕様変更する予定です。
- \* 1C63、64は本体のみ防水仕様です。フットシェルは適宜交換してください。

