

ottobock.

Quality for life

4R10=111 クイックチェンジ

「足は、取り替える時代へ」

お風呂、お子様の運動会への参加、会社のレクリエーション、スポーツ、海水浴・・・
社会生活の中には、1つの義足だけでは対応できない場面が多く存在します。

場面に合わせて必要な足部を選び、ユーザー自身が取り替えて出掛ける。
切断を障害にしない環境づくり。

そんな時代を、真剣に夢見ています。

- ▶ 足部を自由に交換
- ▶ ズボンなどの着脱が容易
- ▶ ロックピンを外す、締める、の簡単操作
- ▶ ユーザー自身が操作
- ▶ 真水、塩水に対応



4R10=111 クイックチェンジ

構造

- 1 本体 上部パーツ**
ピラミッド構造で近位パーツと接続される。
下部にマグネットを内蔵し、上部パーツとの接続をサポートする。
ポイント表示により、印を合わせるだけで上下パーツの前後位置を正しく組合わせることができる。
- 2 本体 下部パーツ**
上部パーツを収納し、4穴アダプターで遠位パーツと接続される。
- 3 ロックピン**
上部・下部パーツを固定するピン。
ユーザー自身が抜き差しを行う。



納品内容

2個の下部パーツが同梱されます。
本体遠位には 4G791 スペーサーとネジが接続されており、様々なタイプの4穴ソケットアダプターに適應します。4R54、4R22などと組合わせる際は、スペーサーを取り外して使用可能です。



テクニカルインフォメーション

発注品番	4R10=111
モビリティグレード	2 - 4
実長*	スペーサー有: 33mm スペーサー無: 30mm
重さ	220g
材質	アルミ、プラスチックなど
防水**	真水、塩水に対応
体重制限	125 kg

*本体下縁から上部接続アダプターが被る位置までの高さ。
**濡れた後は、清潔なぬるま湯で洗浄し、乾燥させてください。

使用上の注意

- ロックピンを締めた状態で使用してください。マグネットは、補助的な役割のみであり、固定力はありません。
- 4R10 クイックチェンジは、足部およびアダプターの取り外しを可能にする製品です。膝継手より遠位に設定してください。



お問い合わせ先