

ottobock.


6A40 マグノフレックス

装着しやすさを追求したシャトルロック



Quality for life


「ピンが曲がる!?!」

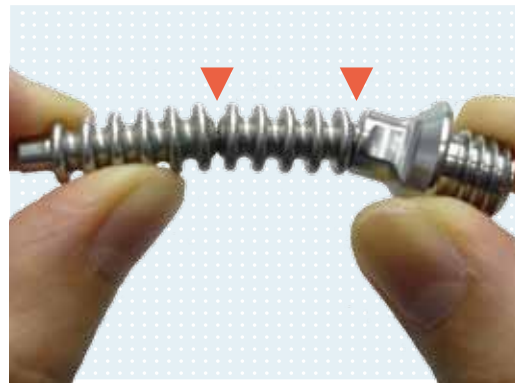

「磁石でピンを引き寄せる!?!」



こんなシャトルロック見たことがない！装着しやすさを追求した、全く新しいシャトルロックが誕生しました。フレキシブルピンとマグネット内蔵で、ピンの挿入をサポートします。

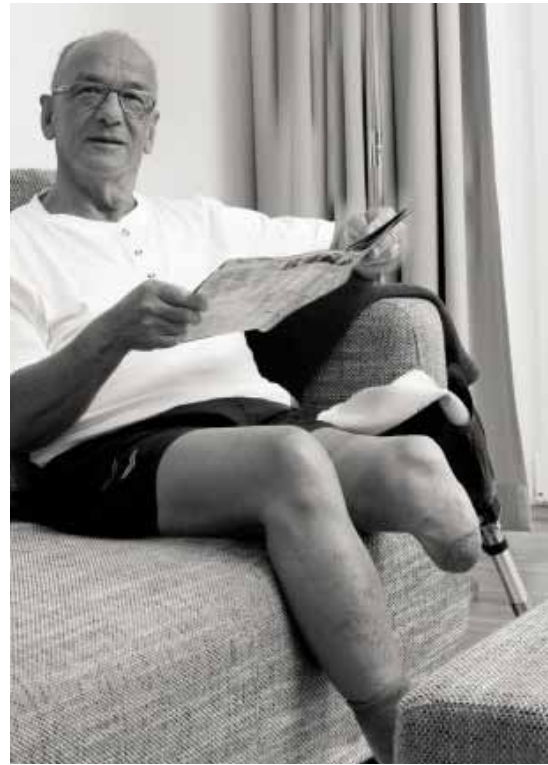

義足ユーザーさんにとって、義足で1歩を踏み出す前に必ずしなければいけないこと、それは“義足を装着すること”です。毎日繰り返される、義足のスタートである装着を、従来のシステムよりも快適に、楽に、そして確実にすること。

この実現のために生まれたのが、6A40マグノフレックスです。

推奨する対象ユーザー

- MG1-3の低～中活動ユーザー
- 体重制限125kg
- 下腿切断ユーザー

* 大腿切断にも使用できますが、アライメントに制限があるため注意が必要です。

特長

- **フレキシブルピン**
2つの可動部を持つフレックスピンは、好きな方向に曲げられるだけでなく、シャトルロックの開口穴へのピンの挿入を素早く行うことができます。
- **マグネット内蔵**
シャトルロック本体に、マグネットを内蔵。ピンを開口穴へ誘導し、スムーズな装着を可能にします。
- **軽量化と耐久性**
本体素材に、高性能ポリアミドを使用。水や埃にも強い耐久性を持ちながら、軽量です。
- **製作工程の簡素化**
1回のラミネーションで簡単に製作できます。
- **4穴アダプター**
遠位接続には、オットーボックのシャトルロックで初めて4穴アダプターを採用。接続の選択肢が広がりました。

- * フレキシブルピンは、開口部への挿入を楽にするためのものであり、ピンの位置を補正するものではありません。断端の長軸に位置しない状態で使用すると、ライナーの早期破損や思わぬ破損に繋がりますのでご注意ください。
- * フレキシブルピンは、6A40 シャトルロック本体との組み合わせでのみご使用ください。他のシャトルロックでは使用できませんのでご注意ください。
- * 製作工程については、別途詳しい写真入りのマニュアルをご用意しています。必要な方は、正規代理店またはオットーボック・ジャパン(株)にお問合わせください。



納品時のパッケージ内容



- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ① シャトルロック本体
ラミネーションアンカー | ④ バルブ |
| ② シャトルロック本体
マグネット内蔵 4 穴アダプター | ⑤ ラチェットユニット |
| ③ フレキシブルピン | ⑥ ダミーとダミー用ネジ |
| | ⑦ ブッシュ式 (4 個) |
| | ⑧ ネジ式 (各 4 個) |

* 付属のバルブ(④)を本体開口穴にシリコンボンドで接着することで、後に、吸着システムとして使用することができます。同じパーツで、ピンから吸着システムへ変えることができます。

6A41 スライディングプレート



専用のスライディングプレートを遠位に取付けることで、アライメントの調整幅が広がります。本ソケットにもご使用いただけます。

- 125kg 対応
 - 重さ 109g
- 別途注文が必要です。

発注情報/テクニカルデータ

発注品番	6A40
体重制限	125kg
重量	225g
全長 (ライナー下端部～6A40下端の距離)	37mm

お問い合わせ先