


ottobock.

NEW

6Y110 Skeo Sealing

Quality for life

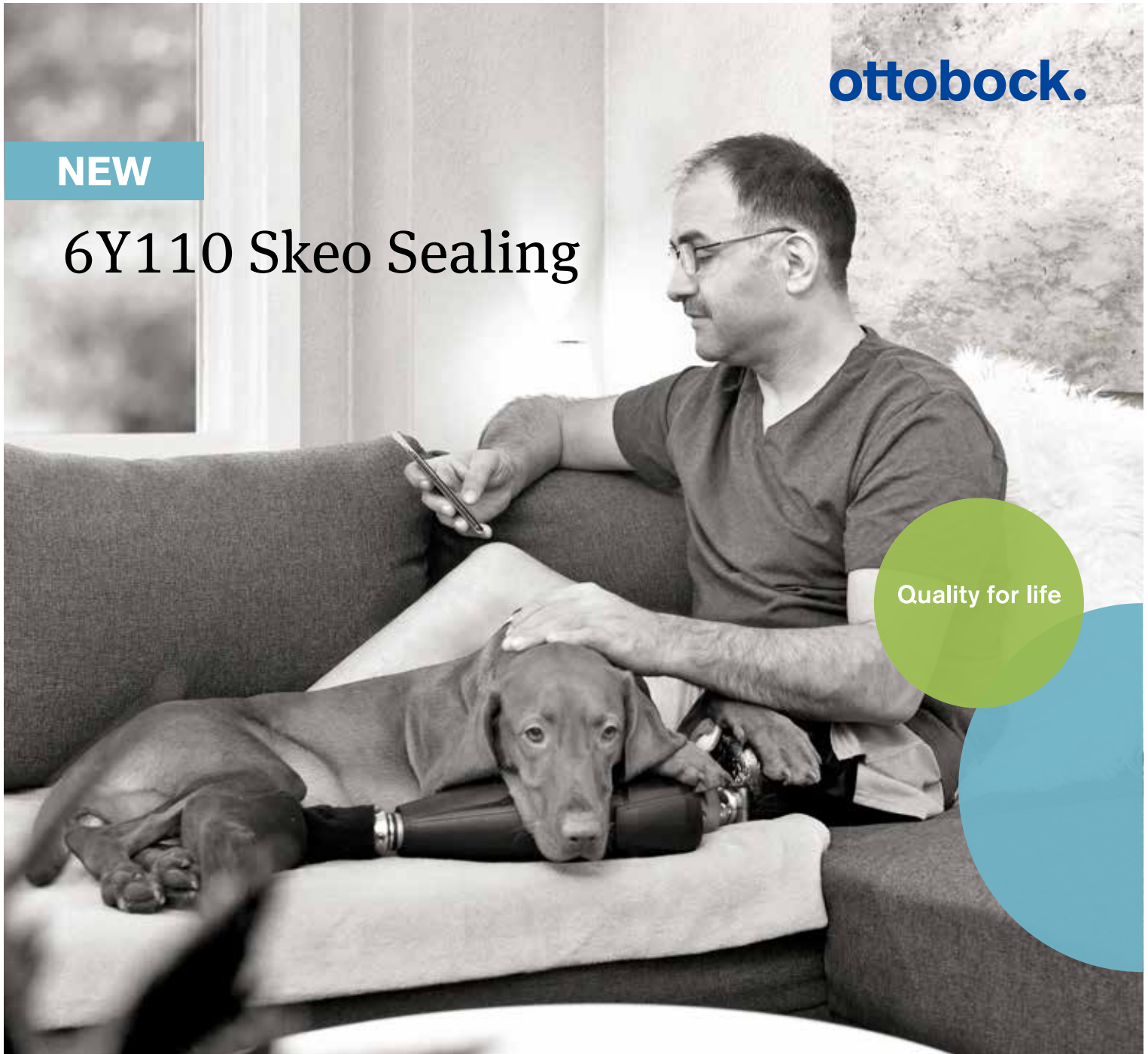


6Y110 Skeo Sealing 抗菌

6Y110 は、オットーボックが得意とする、滑らかで操作性の良いシリコンを使用した、大腿用の布なしシーリングライナーです。ワンウェイバルブ、または電動のハーモニーポンプなどと併用することで、安定した吸着を得ることができます。

- さらさら表面加工
- 内蔵の特殊繊維により、大腿の軟部組織を固定
- 布なしで洗浄が容易
- リング位置：端末から 10cm、17cm の 2 種
- 抗菌加工



6Y110の構造

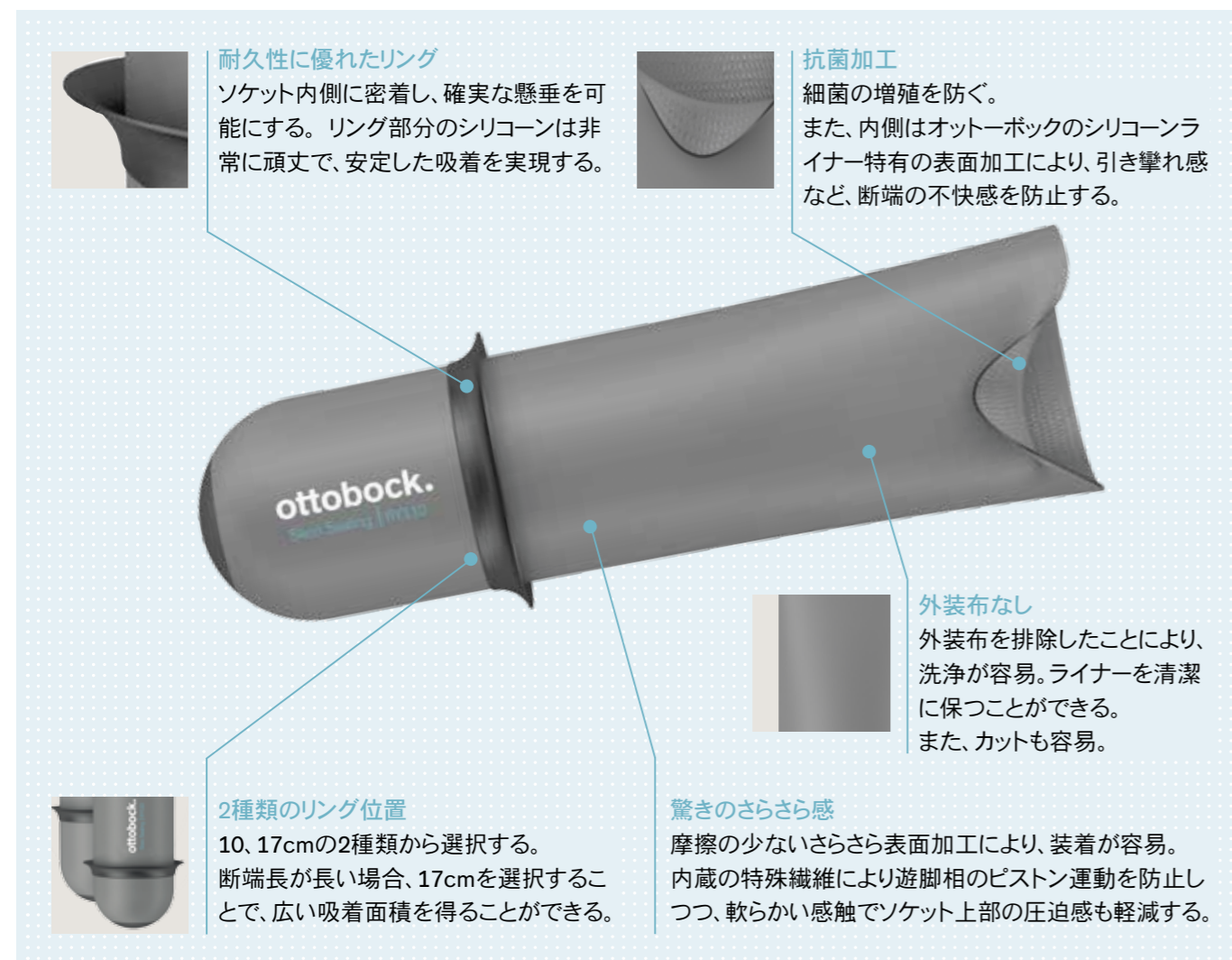

ユーザーフレンドリー



ライナーを装着することを、面倒だと思わなくなりました。

- ・ **装着が容易**
さらさら表面加工により、断端への装着、ソケットへの装着時のストレスを軽減。
- ・ **洗浄が容易**
布なしの 6Y110 は、洗浄後タオルで水分を拭き取ることができるため、乾燥の時間を短縮。
- ・ **断端の不快感軽減**
内側の特殊表面加工により、引き攀れ感が少なく快適。また、上部が柔らかいため、大腿部内側などの不快感も軽減する。

CPO フレンドリー

6Y110 を使用する上で、通常のソケット製作と異なる点はありません。


オットーボック・ジャパンでは、サイズ選択または採型にご使用いただけるカット済のデモ機をご用意しています。裏面のテクニカルインフォメーションをご参照の上、ユーザー様の断端長によって、サイズ、リング位置、デモ機の長さをご指定ください。

デモ機の長さ



断端末から内側縁の距離を参考に、下記の選択肢から指定してください。

リング位置 10cm の場合：15cm、20cm

リング位置 17cm の場合：25cm、30cm

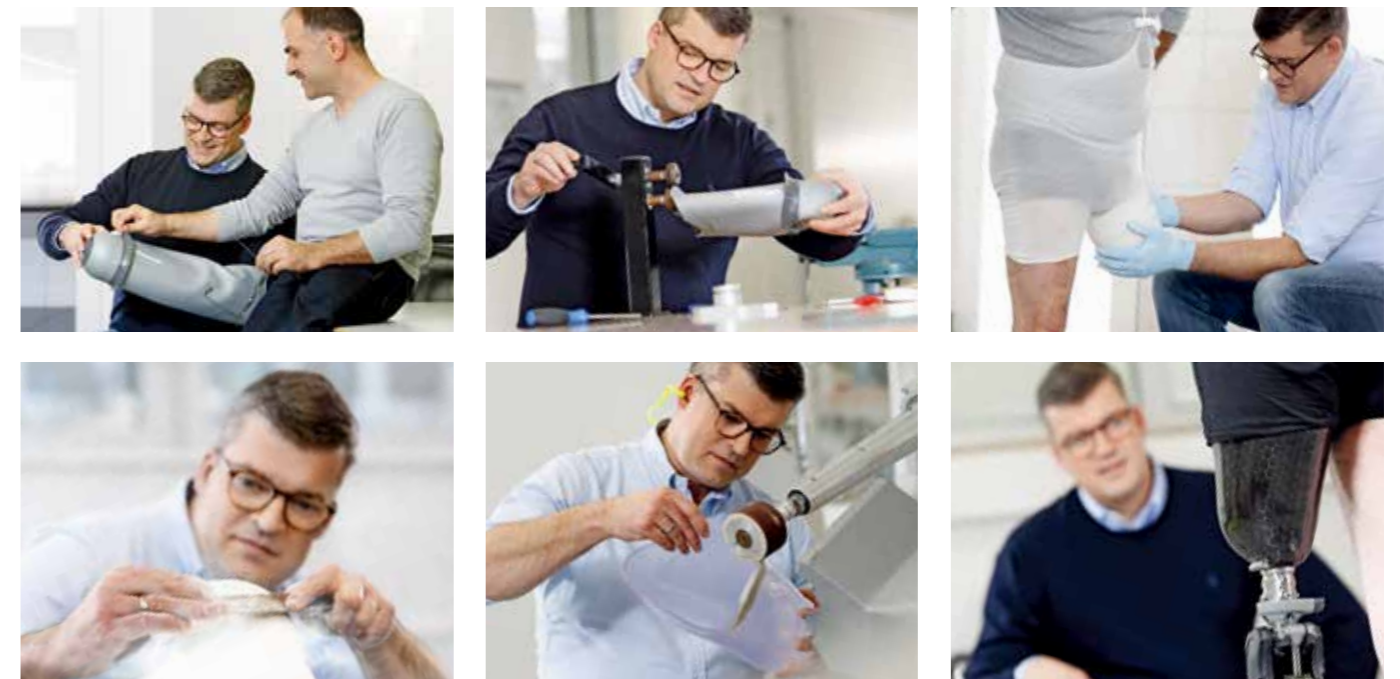

テクニカルインフォメーション

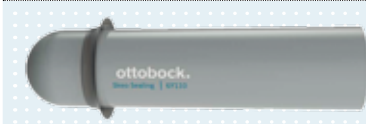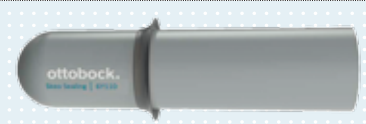発注品番	6Y110=サイズx10	6Y110=サイズx17
詳細	リング高さ10cm	リング高さ17cm
		

サイズ* 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 450, 500, 550mm

* 断端末から近位5cmの周径


リング選択の目安

断端長 15cm ~ 22cm の場合

→ x 10 を選択

断端長 22cm ~ の場合

→ x 17 を選択

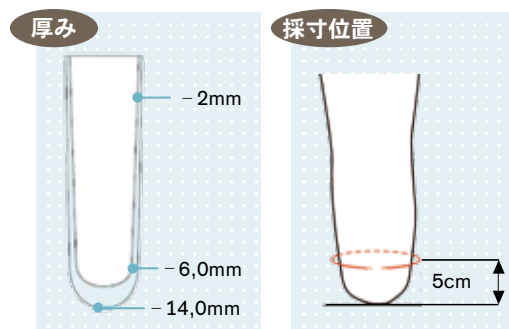

オットーボック・ジャパン株式会社
 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F
 TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112
www.ottobock.co.jp

お問い合わせ先